

Kühlendes Schmerzpflaster, Hydrogel

Genießen Sie lang anhaltende Linderung und Komfort mit unseren kühlenden Hydrogel-Pflastern! Die Kombination aus Menthol und Hydrogel sorgt für eine wirksame Kühlung, die Schmerzen im Rücken, in Gelenken und Muskeln lindert. Sie hilft, Muskel- und Sehnenverspannungen zu reduzieren. Das weiche Vlies und der sanfte Klebstoff ermöglichen eine einfache Anwendung, sicheren Halt und hohen Tragekomfort – diskret und angenehm den ganzen Tag über.

Anwendung:

Die betroffene Hautstelle reinigen und trocknen, anschließend das Pflaster auf die gewünschte Stelle aufkleben. Bis zu 8 Stunden wirken lassen.

Immer nur 1 Pflaster verwenden, maximal 2 pro Tag, höchstens 7 Tage lang.

Eine erneute Anwendung an derselben Stelle wird nach einer Pause von 7–14 Tagen empfohlen.

Kinder unter 12 Jahren dürfen das Pflaster nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.

Schwangere und stillende Frauen sollten das Pflaster nur nach Rücksprache mit dem Arzt benutzen.

Beenden Sie die Anwendung und konsultieren Sie einen Arzt, wenn:

- Hautreaktionen wie Ausschlag, Juckreiz, Rötung, Reizung, Schmerzen, Schwellung oder Blasen auftreten,
- sich der Zustand verschlechtert oder Symptome länger als 7 Tage anhalten,
- Symptome abklingen und nach einigen Tagen zurückkehren.

Nicht anwenden:

- auf verletzter Haut,
- zusammen mit Wärmepackungen,
- im Kontakt mit Schleimhäuten, insbesondere den Augen,
- bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe.

Zusammensetzung: Gereinigtes Wasser, Glycerin, Menthol, Natriumhyaluronat, Glucosamin-Chondroitin, Vliesstoff, Klebstoff.

Nur zur äußeren Anwendung. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Medizinprodukt.

Lagerung: Vor direkter Sonneneinstrahlung, Frost und Feuchtigkeit schützen. Trocken bei Temperaturen bis 25 °C lagern.

Pflastergröße: 7 × 10 cm **Packungsinhalt:** 2 Pflaster

Hersteller: Zhengzhou Yupintang Medical Instrument Co., Ltd., No. 27, Fenglin Road, High-tech Industrial Development Zone, Zhengzhou City, Provinz Henan, China

Bevollmächtigter in der EU: Evertbiz GmbH, Landsberger Str. 155, 80687 München, Deutschland

Vertrieb für Tschechien: F.group partner, s.r.o., Velké dráhy 74e, 664 61 Opatovice, Tschechien, E-Mail: fgroup@fgroup.cz

Vertrieb für die Slowakei: Fazzini group, a.s., Bulharská 42, 917 01 Trnava, Slowakei, E-Mail: fazzini@fazzini.sk

Website: www.fortepatch.com

CE-zertifiziert. Medizinprodukt.