

## **Kühlpflaster zur Linderung von Kopfschmerzen und Fieber**

Bei Fieber oder Kopfschmerzen sorgt dieses Pflaster für schnelle und angenehme Kühlung – geeignet für Kinder und Erwachsene. Dank der innovativen Hydrogel-Formel mit Kühleffekt wirkt es sofort, erfrischt langanhaltend und muss nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden. Sanft zur Haut, geruchlos und ohne Medikamente.

Verwenden Sie das Pflaster bei Kopfschmerzen, erhöhter Temperatur, Müdigkeit oder Überhitzung. Es dient der vorübergehenden Linderung und kann auch zur Abkühlung bei Hitze oder nach körperlicher Anstrengung genutzt werden.

**Anwendung:** Haut reinigen und trocknen. Schutzfolie abziehen und auf Stirn oder Nacken kleben, nicht auf behaarte Stellen. Pro Tag höchstens 2 Pflaster, jeweils bis zu 7 Tage. Kinder unter 12 Jahren nur unter Aufsicht. Schwangere und Stillende nur nach Rücksprache mit dem Arzt.

### **Anwendung abbrechen und Arzt aufsuchen, wenn:**

- Hautreaktionen wie Ausschlag, Rötung, Juckreiz, Reizung, Schmerzen, Schwellung oder Blasen auftreten,
- sich der Zustand verschlechtert oder Symptome länger als 7 Tage anhalten,
- Symptome abklingen und nach wenigen Tagen zurückkehren.

### **Warnhinweise:**

- Nicht auf verletzter Haut anwenden.
- Nicht mit Heizauflagen verwenden.
- Kontakt mit Schleimhäuten, besonders Augen, vermeiden.
- Nicht verwenden bei Überempfindlichkeit gegen Inhaltsstoffe.

**Zusammensetzung:** Mentha, Glycerin, Gereinigtes Wasser, CMC-Emulsion, Vliesstoff, Klebstoff.

**Nur zur äußeren Anwendung. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.**

**Medizinprodukt.**

**Lagerung:** Vor Sonne, Frost und Feuchtigkeit schützen. Trocken bei max. 25 °C lagern.

**Größe:** 5 × 12 cm     **Packungsinhalt:** 1 Pflaster

**Hersteller:** Zhengzhou Yupintang Medical Instrument Co., Ltd., No. 27, Fenglin Road, High-tech Industrial Development Zone, Zhengzhou City, Provinz Henan, China

**Bevollmächtigter in der EU:** Evertbiz GmbH, Landsberger Str. 155, 80687 München, Deutschland

**Vertrieb für Tschechien:** F.group partner, s.r.o., Velké dráhy 74e, 664 61 Opatovice, Tschechien, E-Mail: [fgroup@fgroup.cz](mailto:fgroup@fgroup.cz)

**Vertrieb für die Slowakei:** Fazzini group, a.s., Bulharská 42, 917 01 Trnava, Slowakei, E-Mail: [fazzini@fazzini.sk](mailto:fazzini@fazzini.sk)

**Web:** [www.fortepatch.com](http://www.fortepatch.com)

**CE-zertifiziert. Medizinprodukt.**