

## **Wärmepflaster zur Linderung von Menstruationsbeschwerden – Pflanzliche Zusammensetzung für wirksame Erleichterung**

Das Pflaster lindert dank seiner pflanzlichen Inhaltsstoffe Schmerzen und Krämpfe während des Menstruationszyklus. Es bietet tiefenwirksame Wärme bis zu 8 Stunden lang. Das angenehme Design sorgt für Komfort und Entspannung während des Tages.

### **Anwendung:**

Haut reinigen und trocknen.

Schutzfolie abziehen und Pflaster auf die gewünschte Stelle kleben.

Bis zu 8 Stunden wirken lassen.

Maximal 1 Pflaster täglich auf derselben Stelle anwenden, höchstens 7 Tage in Folge.

Kinder unter 12 Jahren nur unter Aufsicht verwenden.

Schwangere und Stillende nur nach ärztlicher Rücksprache anwenden.

### **Anwendung abbrechen und Arzt aufsuchen, wenn:**

- Hautreaktionen wie Ausschlag, Juckreiz, Rötung, Schmerzen oder Blasen auftreten,
- sich der Zustand verschlechtert oder Symptome länger als 7 Tage anhalten.

### **Nicht anwenden:**

- auf verletzter Haut,
- mit Wärmepackungen,
- im Kontakt mit Schleimhäuten oder Augen,
- bei Überempfindlichkeit gegen Inhaltsstoffe.

**Zusammensetzung:** Paeonia Suffruticosa, Leonuri Herba, Chuanxiong Rhizoma, Angelicae Sinensis Radix, Angelicae Dahuricae Radix, Zingiberis Rhizoma, Carthami Flos, Eisenpulver, Aktivkohle, anorganisches Salz, Vliesstoff, Klebstoff.

Nur zur äußeren Anwendung. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.  
Medizinprodukt.

**Lagerung:** Vor Sonne, Frost und Feuchtigkeit schützen. Kühl und trocken bei bis zu 25 °C lagern.

**Pflastergröße:** 10 × 8 cm      **Packungsinhalt:** 2 Pflaster

**Hersteller:** Zhengzhou Yupintang Medical Instrument Co., Ltd., No. 27, Fenglin Road, High-tech Industrial Development Zone, Zhengzhou City, Provinz Henan, China

**EU-Bevollmächtigter:** Evertbiz GmbH, Landsberger Str. 155, 80687 München, Deutschland

**Vertrieb Tschechien:** F.group partner, s.r.o., Velké dráhy 74e, 664 61 Opatovice, Tschechien, E-Mail: fgroup@fgroup.cz

**Vertrieb Slowakei:** Fazzini group, a.s., Bulharská 42, 917 01 Trnava, Slowakei, E-Mail: fazzini@fazzini.sk

**Website:** [www.fortepatch.com](http://www.fortepatch.com)

**CE-zertifiziert. Medizinprodukt.**